



## Asiento de pasta de papel



## Asiento de pasta de papel

### Breve descripción

Es un asiento de una sola pieza, muy ligero, y bastante estético. Con él hemos conseguido una mejor sedestación, ya que eleva la hemipelvis izquierda lo que ayuda a distribuir las presiones de manera más uniforme, evita la retroversión y rotación pélvica, dando más equilibrio al tronco y repercutiendo en una mayor funcionalidad a nivel de MMSS (miembros superiores). Sin olvidarnos de la sencillez en el proceso de fabricación y lo sumamente asequible que son los materiales de los que se compone.

### Para quién se hizo y con qué objeto

Para una niña de 8 años, con problemas posturales. Se realizó para mejorar la sedestación de la niña en el colegio y en la Sala de Terapia Ocupacional.

### Materiales y modo de funcionamiento

Los materiales necesarios son:

- agua.
- cola.
- papel (de periódico) y papel de seda.
- una caja de cartón.
- pinceles.
- latex.
- un trozo pequeño de espuma.

## Proceso de elaboración

- 1- Sentamos a la niña en un gran trozo de papel y trazamos con un rotulador la silueta.
- 2- El papel donde queda dibujada la silueta lo fijamos a un cartón grueso.
- 3- Cortamos tiras de papel de periódico con nuestras manos y las echamos en un recipiente con agua.
- 4- En un vaso mezclamos la cola con el agua.
- 5- Vamos cogiendo trozos de papel mojado y los vamos colocando siguiendo la silueta, los fijamos con ayuda de un pincel untado de cola y agua.
- 6- Una vez terminada la silueta y haciendo las modificaciones (elevar la hemipelvis izquierda, taco abductor y apoyo que ayude a la retroversión) le damos una capa uniforme de cola diluida a todo el asiento y dejamos secar.
- 7- Probamos el asiento para ver si hay que realizar alguna modificación.
- 8- Por último, para forrar el asiento; cortamos con las manos pedazos de papel de seda y con ayuda de latex diluido con agua y un pincel, vamos forrando el asiento para darle un aspecto más estético.

## Precauciones

Si el niño tiene poco peso es mejor fijar el asiento con velcros o antideslizante al asiento de la silla.

## Autores y datos de contacto

**Apellidos:** MOGEDANO HOLGUERA

**Nombre:** SARA

**Dirección:** C/ ÉVORA N°3 1ªA

**Código Postal :** 10005

**Ciudad:** CÁCERES

**País:** ESPAÑA

**Teléfono:** 666712507

**Fax:** 927005500

**Correo elec. :** sara.mogedano@juntaextremadura.net

## Galería de imágenes



Vista lateral de la adaptación acabada