



Cubierto adaptado.



Cubierto adaptado.

Breve descripción

Cubierto con distintas medidas de grosor.

Para quién se hizo y con qué objeto

Se realizó para usuarios de una residencia de mayores para potenciar la autonomía en las ABVD (alimentación).

Materiales y modo de funcionamiento

- Cuchara, tenedor y
- coquilla (material de goma espuma de ferretería)

Proceso de elaboración

Se corta un trozo de coquilla y se acopla al mango de una cuchara y/o tenedor, se va engrosando el mango de éste con el objeto de facilitar el agarre. Se pueden obtener distintos grados de diámetro y añadir pesos.

Autores y datos de contacto

Nombre 1: Isabel Bernal Lares y Juana.

Nombre 2: Juana Estévez González.

Código Postal : 29738

Ciudad: Málaga.

País: España.

Correo electrónico : jzalez@hotmail.com

Galería de imágenes



Vista de cuchara con mango engrosado.