



## SEPARADOR DE CADERAS TROTTE-LAPIN.



Este obra se publica bajo una  
[Licencia Creative Commons Atribución-  
NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)



## SEPARADOR DE CADERAS TROTTE-LAPIN.

### Breve descripción

Se trata de un dispositivo de gomaespuma que favorece la **posición correcta en el suelo**, no permitiendo la sedestación en W-sitting y evitando la instauración de alteraciones ortopédicas como luxación de cadera, antetorsión femoral. Así mismo, permite integrar a los niños con afectación sensoriomotora en actividades educativas en aula y juegos en casa, pudiendo poner en practicar sus habilidades de manipulación y exploración.

### Para quién se hizo y con qué objeto

Este dispositivo se hizo para un niño con discapacidad sensoriomotora. Con hipotonía y ataxia.

Como está hecho con un material muy ligero favorece que acompañe al niño en sus movimientos sin molestarle con el roce en el suelo.

El conejito también permite, si el niño es capaz de hacerlo, ponerse de pie y andar, en este caso con los muslos separados. Su uso está enfocado para la sedestación en el suelo, ofreciendo la máxima protección y estabilidad, aunque también permite que el niño pueda interactuar con el entorno en bipedestación.

### Materiales utilizados

Para su elaboración se ha utilizado:

- Goma espuma de alta densidad. La forma de la espuma

## Proceso de elaboración

se realiza a medida del niño.

- Está forrado con un tejido a elegir y se sujeta con velcros a la cintura, fácil de quitar y poner.
- Material de costura (tijeras, hilo, aguja, máquina de coser)

### 1.

Cortaremos un trozo de gomaespuma a medida del niño y lo forraremos con una tela a elegir.

### 2.

Después se cose otro trozo de tela encima del anterior que será el que se sujete a la cintura y que llevará velcros en sus extremos.

La idea es como si fuera un pañal de bebe al que se le ha añadido una base de gomaespuma en la parte central.

(Ver imágenes)

Bibliografía consultada:

- Le Métayer, M. (1995) Reeducción Cerebromotriz del niño pequeño. Educación Terapéutica. Paris: Masson, Sa. Edición original. 183 págs.
- Macías Merlo, L. y Fagoaga Mata, J. (2004) Fisioterapia en pediatría. España: Mcgraw-Hill. Interamericana. Edición original. 460 págs.

## Precauciones

Como precauciones no se debe insistir que se desplace con él puesto. Cuando el desarrollo motor del niño lo permita hay que favorecer la posición de pie y la marcha sin el dispositivo.

## Autores y datos de contacto

**Apellidos:** Sánchez Verdú

**Nombre:** Juliana

**Dirección:** Barrio Canteros,1

**Código Postal :** 02420

**Ciudad:** Isso, Hellín, Albacete.

**País:** España

**Teléfono:** 669931890

**Apellidos:** Aliaga Vega

**Nombre:** Maite

**Dirección:** C/ Agosto 4-3 H

**Código Postal:** 02006


**Ciudad:** Albacete

**País:** España


**Teléfono:** 606 792 235

**Correo electrónico:** aliagamaite@gmail.com


## Galería de imágenes.

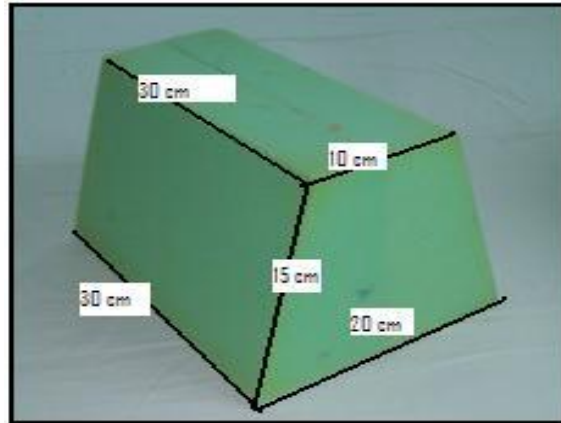

FORMA DE LA GOMAESPUMA CON MEDIDAS.

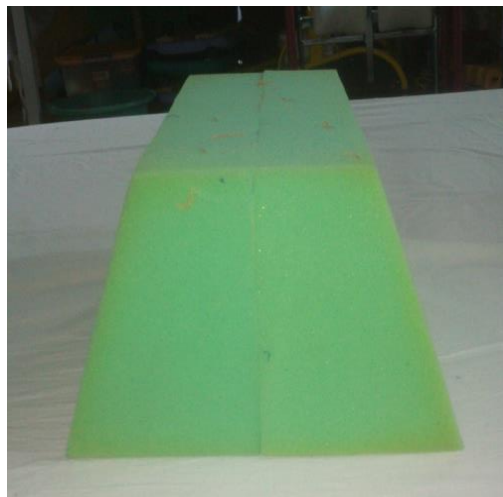

VISTA FRONTAL.

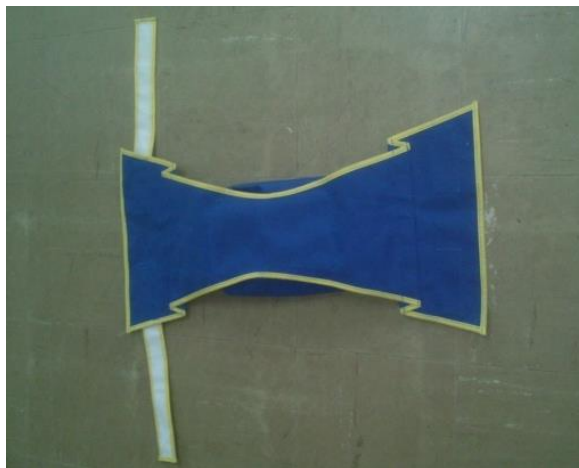

FORRO DE TELA CON VELCROS. VISTA SUPERIOR.



FORMA DEL FORRO CON VELCROS EN LOS EXTREMOS. VISTA INFERIOR.



VISTA LATERAL.



CONEJITO PEQUEÑO.



CONEJITO GRANDE.



SEDESTACIÓN EN W-SITTING. Sentado en el suelo con glúteos entre los talones.  
POSTURA NOCIVA.





NIÑO EN POSICION DE RODILLAS CON EL CONEJITO. VISTA LATERAL.



NIÑO EN POSICION DE RODILLAS CON EL CONEJITO. VISTA FRONTAL.



POSICION DE CUADRUPEDIA.



POSICION BÍPEDA.



DESPLAZAMIENTO LATERAL CON APOYO