



## Vaso recortado





## Vaso recortado.

### Breve descripción

Vaso de plástico recortado por uno de los lados para poder introducir la nariz y/o las gafas sin necesidad de elevar la cabeza.

### Para quién se hizo y con qué objeto

Se realizó para una persona con flexión de cuello y deterioro cognitivo.

La idea era que pudiera beber todo el vaso de forma autónoma sin necesidad de apoyo de otra persona. Además, se procuró que el material fuera de plástico para evitar que se rompiera en caso de caída.

### Materiales y modo de funcionamiento

- Vaso de plástico.
- Tijeras.
- Lija.

### Proceso de elaboración

En primer lugar se marca por dónde se va a rebajar el vaso en función de la persona. Posteriormente se corta con tijeras y, después, se lija.

### Precauciones

Es importante lijar para evitar arañazos en la nariz.

## Autores y datos de contacto

Apellidos: **Cerezo Guillén**

Nombre: **Ana Caridad**

Dirección: **C/Béjar N° 36**

Código Postal : **45280**

Ciudad: **Olias del Rey (Toledo)**

País: **España**

Teléfono: **658560\*\*\***

Correo electrónico : [anaapanas@yahoo.es](mailto:anaapanas@yahoo.es)

## Galería de imágenes



Vista de la adaptación acabada



Vista de los materiales empleados en la adaptación.



Vista de una persona haciendo uso de la adaptación.